

FICHE TECHNIQUE

ANIMALINTEX HOOF SHAPED

POSOLOGIE ET MODE D'UTILISATION

- Nettoyer soigneusement la zone à traiter
- placer Animalintex Hoof dans un bol, la face plastifiée vers le haut
- verser de l'eau (chaude ou froide selon le cas) dans le récipient autour des bords du Animalintex Hoof
- lorsqu'il est bien imbibé d'eau, retirer le coton du bassin et enlever l'excédent d'eau en exerçant une légère pression
- appliquer l'emballage sur la zone affectée, la surface plastifiée tournée vers l'extérieur (sans contact avec la peau), en le modelant sur les bords de la zone d'application
- appliquer un bandage de contention externe, en veillant à ce que le bandage soit complètement recouvert



EMBALLAGE

Une enveloppe contient 3 pièces

DESCRIPTION

Animalintex est un produit multicouche très absorbant, facile à utiliser et adapté à un large éventail de problèmes courants du pied du cheval.

- *Impacco caldo*: laminiti croniche, imputridimento del fettone, sobbattiture
- *Impacco freddo*: laminite acuta

CODE PRODUIT

EAN13: 5010058087194

