

SCHEDA TECNICA

ANIMALINTEX HOOF SHAPED

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

- Pulire completamente la zona da trattare
- mettere Animalintex in una bacinella con la parte plastificata rivolta verso l'alto
- versare l'acqua (calda o fredda a seconda dell'esigenza) nel recipiente intorno ai bordi di Animalintex Hoof
- dopo che si è ben impregnato d'acqua, rimuovere dalla bacinella l'impacco ed eliminare, con una leggera pressione, l'acqua in eccesso
- applicare l'impacco sull'area interessata con la superficie plastificata verso l'esterno (non a contatto con la cute), modellandolo ai margini della zona di applicazione
- applicare una fasciatura contenitiva esterna assicurandosi che l'impacco sia completamente coperto



CONFEZIONE

Una busta contiene 3 pezzi

DESCRIZIONE

Animalintex è un impacco multistrato, ad elevata capacità assorbente, facile da utilizzare e adatto per un'ampia gamma di problematiche comuni nel piede del cavallo.

- *Impacco caldo*: laminiti croniche, imputridimento del fettone, sobbattiture
- *Impacco freddo*: laminite acuta

CODICE PRODOTTO

EAN13: 5010058087194 - Codice Paraf: 910410202

