

SCHEDA TECNICA

ANIMALINTEX

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

- Pulire completamente la zona da trattare
- mettere la falda di Animalintex in una bacinella poco profonda, con la superficie plastificata rivolta verso l'esterno
- Versare l'acqua nel recipiente intorno ai bordi di Animalintex
- Dopo che si è ben impregnato d'acqua, rimuovere dalla bacinella l'impacco ed eliminare, con una leggera pressione, l'acqua in eccesso
- Applicare l'impacco sull'area interessata con la superficie plastificata verso l'esterno (non a contatto con la cute), modellandolo ai margini della zona di applicazione
- Applicare una fasciatura contenitiva esterna assicurandosi che l'impacco sia completamente coperto



CONFEZIONE

Una busta contiene 1 falda.
Una scatola contiene 10 falde.

DESCRIZIONE

Impacco multistrato, ad elevata capacità assorbente, facile da utilizzare e adatto per un'ampia gamma di problematiche comuni nel cavallo.

- *Impacco caldo*: abrasioni, contusioni, ferite contaminate ed infette, ascessi
- *Impacco freddo*: tendinite, desmiti, schinelle, traumi

CODICE PRODOTTO

EAN13: 5010058057043 - Codice Paraf: 910410190

